





# *Congratulazioni per la tua scelta!*

Innanzitutto complimenti per aver scelto l'apparecchio *Skin Revolution*.

In questo manuale vogliamo darti alcune indicazioni per utilizzare al meglio il tuo apparecchio per i trattamenti di trucco permanente.

## CARATTERISTICHE DEL MODELLO SKIN REVOLUTION

Il modello *Skin Revolution* ha un cuore tecnologico di ultima generazione, grazie al quale potrai effettuare i trattamenti di trucco permanente e di microneedling in modo facile, veloce e con grande precisione.

L'apparecchio è leggero, facile da trasportare e di semplice utilizzo.

Una caratteristica unica al mondo: in caso di assenza di corrente o quando non è possibile arrivare agevolmente ad una presa elettrica, la batteria interna permette di lavorare in modo costante per circa 2 ore.

Non occorre ricaricarla in un secondo momento: si ricarica in automatico anche durante l'utilizzo semplicemente collegando l'apparecchio alla presa di corrente.



## DISPLAY LCD: FACILE ED INTUITIVO

Il display LCD facilita la lettura dei dati del programma selezionato, della velocità del demografo, del tempo di accensione dell'apparecchio e della corrente.



## IL DERMOGRAFO: LA TUA BACCHETTA MAGICA!

Il demografo sarà davvero la tua bacchetta magica! Con soli 61 grammi di peso e dallo spessore di una penna, fare i trattamenti sarà come scrivere su un foglio di carta: leggero, ultra-preciso, maneggevole, i trattamenti avranno un livello di qualità mai raggiunto prima!

Il demografo ha un motore a sistema di rotazione magnetica prodotto in Germania in esclusiva per noi.

Silenzioso (circa 45 dB), a basso consumo ma ad alta efficienza, fluido, potente, senza vibrazioni, te ne innamorerai al primo utilizzo!

- Regolazione dell'ago: da 0 a 2,5 mm
- Peso: 61 grammi
- Velocità: da 22000 a 35000 revs/min (RPM)



ATTACCO A VITE DELLA CARTUCCIA

GHIERA DI REGOLAZIONE FUORIUSCITA DELL'AGO

## CARTUCCE

Il sistema di cartucce progettato per *Skin Revolution* è stato progettato per eliminare lesioni secondarie grazie al processo di nano-lucidatura a 360 gradi sull'ago.

Il sistema a cartuccia garantisce la massima resa per qualsiasi tipo di pigmento presenti nel mercato.

Ogni cartuccia è confezionata in atmosfera protetta e sterilizzata con un processo medicale all'ossido di etilene (ETO), processo impiegato nel settore farmaceutico.



Fuoriuscita suggerita dell'ago per i trattamenti di trucco permanente:

- Sopracciglia: 1-1,5 mm
- Occhi 0,18-1mm
- Labbra: 0,8-1,2 mm

## ACCORGIMENTI D'UTILIZZO

- Utilizzare l'apparecchio al suo voltaggio, utilizzando i cavi in dotazione
- Non utilizzare l'apparecchio in caso di pelle lesa, allergie o altre patologie della pelle
- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Non utilizzare l'apparecchio connesso alla corrente in caso di temporali ma utilizzare la batteria integrata
- Apparecchio solo per uso professionale
- Non utilizzare su donne in gravidanza o allattamento

## GARANZIE DEL PRODOTTO

Il prodotto è garantito 1 anno dalla data di acquisto o dalla consegna in comodato d'uso. Se hai qualsiasi domanda relativa al prodotto ed al suo utilizzo contattaci al nostro numero aziendale o scrivici una email. Saremo a tua disposizione per assistenza e qualsiasi supporto.

La garanzia non comprende in caso di:

- eventuali danni arrecati volontariamente o involontariamente dal cliente
- manomissione dell'apparecchio
- utilizzo improprio
- danneggiamento in caso di incendio, calamità naturali, terremoto, allagamento.

## CONSERVAZIONE E MANTENIMENTO

In caso di inutilizzo spegnere l'apparecchio, staccarlo dalla presa di corrente e conservarlo nella sua scatola originale.

Tenere lontano l'apparecchio da fonti di calore.

Pulire con un prodotto idoneo per apparecchiature.

Non eseguire nessuna manutenzione dell'apparecchio e chiamare la nostra assistenza in caso di mal funzionamento.

Leggere attentamente questo manuale d'istruzioni.

## ISTRUZIONI DI UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

1. Connettere il cavo di alimentazione alla corrente elettrica e al pannello di controllo
2. Connettere il demografo nell'USB collocata sulla sinistra del pannello
3. Accendere premendo per qualche secondo il tasto On/Off. Il pannello led si accenderà caricando i programmi
4. Svitare il cappuccio protettivo del demografo
5. Montare l'ago scelto per il trattamento, avvitando la cartuccia sul demografo
6. Regolare la fuoriuscita dell'ago ruotando la ghiera. Per regolare correttamente la lunghezza dell'ago l'apparecchio deve essere in funzione. Selezionare quindi un programma e regolare la fuoriuscita dell'ago
7. Per azionare il demografo selezionare un programma tra quelli pre-impostati:

MED: per trattamenti paramedicali

BROW: per i trattamenti alle sopracciglia

EYE per i trattamenti agli occhi

LIP: per i trattamenti alle labbra

Le velocità corrette sono già pre-impostate ma puoi sempre aumentare o diminuire la velocità del demografo selezionando il tasto + o - .

Per spegnere l'apparecchio premere per qualche secondo il tasto On/Off.



## PRODOTTI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

- 1 box contenitore con chiusura a calamita
- 1 pannello di controllo modello *Skin Revolution* con led screen
- 1 dermografo *Skin Revolution* con cavo USB Single Line
- 1 alimentatore per *Skin Revolution*
- 1 confezione di cartucce (aghi) da 10 pezzi per *Skin Revolution*
- 1 manuale d'utilizzo



SKIN

---

PERMANENT BEAUTY

SKIN SRLS UNIPERSONALE  
VIA CAMPO SPORTIVO, 26  
36015 SCHIO (VI)

PER ASSISTENZA E ORDINI:  
TEL. / WHATSAPP 351 7953555  
SKINPERMANENTBEAUTY@GMAIL.COM